

FIL611 T

Lente idrofilica torica customizzata. L'asse del cilindro viene impostato in fase di costruzione della lente, in modo che l'impianto avvenga sempre con le tacche di riferimento posizionate sull'asse 0-180 (Real Axes Technology). Viene fornita con una lente gemella di riserva e indicazioni per agevolare l'impianto.

Toric hydrophilic customized lens. The axis of the cylinder is set during construction, so that the lens is always implanted with the reference marks positioned on the axis 0-180° (Real Axes Technology). It comes with a spare lens and technical drawing to facilitate implantation.

Diametro ottico Optic diameter	6.0 mm
Diametro totale Total diameter	11.80 mm
Angolazione ansa Haptic angulation	5°
Bordo dell'ottica Edge design	Square edge sul retro ansa e zona ottica
Diametro incisione	2.4 mm
Materiale Material	Acrilato pieghevole con 25% H ₂ O e filtro UV
Indice di rifrazione Refractive index	1,461 (546 nm - 20C° Hydrated)
Gamma poteri Diopter range	da -10.00 D a +35.00 D (step 0.25 D)
Cilindro Cylinder	da +1.00 D a +16.00 D (step 0.25) axes 0-180
Costante A consigliata Recommended A constant	118.7
Iniettore consigliato Recommended injector system	Medicel Accuject
Compatibile con cartridge Recommended cartridge	2.1 per incisioni di 2.5 mm

PARAMETRI PER BIOMETRO OTTICO


Costante IOL SRK/T	119.1
Costante IOL SRKII	119.2
Costante A biometria immersione:	119.0
Formula di Holladay I:	costante SF 1.90
Formula di Haigis:	costante a0: 0.051 costante a1: 0.140 costante a2: 0.197
Formula Hoffer Q e Holladay II:	costante pACD 5.68

SOLEKO ID 156


IOL DIMENSION

FIL611 T

REAL AXYS TECHNOLOGY

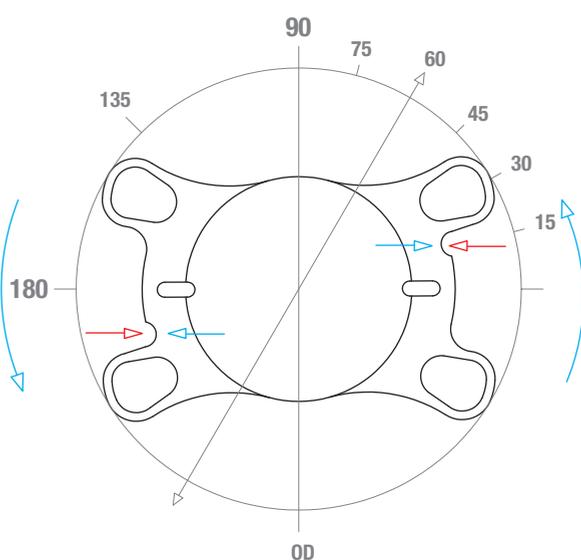

Esempio di lente con cilindro a 60°.

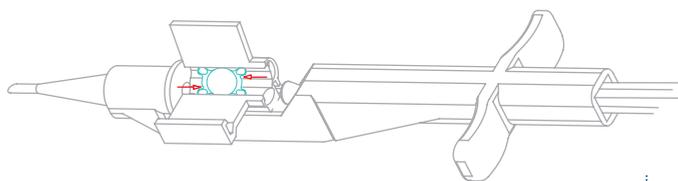

NOTE

L'asse del cilindro viene impostato in azienda al momento della costruzione della lente ed è indicato sul disegno tecnico che la accompagna. La lente deve essere posizionata sempre a 180°; assicurarsi che le tacche sulle anse seguano un andamento antiorario (front view).

The axis of the cylinder is set during construction and is indicated on the technical drawing that accompanies the lens.

The lens must always be positioned at 0-180°; make sure that the notches on the lugs follow a counterclockwise trend (front view).

Produttore: Soleko
Stabilimento di produzione: via Ravano snc - Pontecorvo (FR)
Numero di pezzi contenuti in una scatola: 1
Modalità di sterilizzazione: sterilizzazione a vapore
Destinazione d'uso: Lente intraoculare impiantabile/dispositivo medico
Classe di appartenenza del dispositivo medico: IIB
Tipo di confezionamento: confezionamento singolo sterile

PER UN'INDICAZIONE SUL POTERE DELLALENTE CONSULTARE WWW.SOLEKO-IOL.IT
FOR AN INDICATION OF LENS POWER, PLEASE CONSULT WWW.SOLEKO-IOL.IT